

BLEPHACLEAN®

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

**Questo prodotto è un dispositivo medico.
Leggere le istruzioni prima dell'uso.
Conservare questo foglio illustrativo.
Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.**

INDICAZIONI

BLEPHACLEAN è indicato per l'igiene giornaliera delle palpebre.
Usare solo sulla pelle, non inserire direttamente negli occhi.

INDICATO PER

- Adulti,
- Bambini al di sopra dei 3 mesi: il prodotto deve essere somministrato da un genitore o tutore.

CONTROINDICAZIONI

Non usare BLEPHACLEAN se è allergico a uno dei suoi ingredienti (vedere Descrizione del dispositivo).
In assenza di dati sufficienti, non usare BLEPHACLEAN in gravidanza o in allattamento salvo prescrizione medica.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

BLEPHACLEAN è una garza sterile, impregnata con una lozione per la detersione giornaliera delle palpebre.
La lozione contiene: capriloil glicina, sodio ialuronato, PEG 8, polossamero 184, polisorbato 20, estratto di Centella asiatica in glicole propilenico (glicole propilenico, estratto di Centella asiatica e acqua), complesso per la regolazione del sebo senza conservante (glicole propilenico, estratto di radice di Iris, zinco solfato, PPG-5 cetet 20 e retinil palmitato (Vitamina A), alcool e acqua), PEG 6 caprilico/caprino gliceridi (per esempio macrogol 6 glicerolo caprilcaprinato), dipotassio fosfato, sodio idrossido, potassio diidrogeno fosfato, acqua depurata.
Il colore della garza può variare. Questo è dovuto alla presenza di estratti naturali di piante ed è normale.

VANTAGGI, PRESTAZIONI E MECCANISMO DI AZIONE

BLEPHACLEAN è una garza sterile per l'igiene giornaliera delle palpebre specialmente:

- in caso di sensibilità della pelle, palpebre o occhi,
- per rimuovere polvere, polline e secrezioni palpebrali. Può essere utilizzato durante la cura di allergia o infezione agli occhi,
- in caso di infiammazione o infezione delle palpebre come blefariti, disfunzione delle ghiandole di Meibomio, orzaiolo o calazio. Queste condizioni possono causare sintomi dell'occhio secco come prurito, sensazione di sabbia negli occhi, occhi rossi e/o doloranti,
- per pulire le palpebre prima di procedure oftalmiche come iniezioni terapeutiche nell'occhio (iniezioni intra vitreali), chirurgia laser refrattiva (LASIK o PRK) e intervento di cataratta.

Dal momento che è ben tollerato, BLEPHACLEAN può essere utilizzato anche dopo intervento, sotto il controllo del medico o dell'oftalmologo.

BLEPHACLEAN pulisce e rimuove polvere, polline e le secrezioni palpebrali.

BLEPHACLEAN rispetta il contorno occhi e la flora batterica presente.

Il prodotto è stato testato sotto controllo oftalmologico.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER L'USO

Dosaggio: Prima di intervento chirurgico all'occhio, utilizzare due volte al giorno per 5 giorni o secondo le indicazioni del medico o del farmacista. Negli altri casi, utilizzare due volte al giorno mattina e sera per 3 settimane e successivamente una volta al giorno per 3 mesi o secondo le indicazioni del medico o del farmacista. In condizioni croniche delle palpebre, utilizzare per l'igiene continua delle palpebre a lungo termine.

Non è richiesta una formazione particolare per usare BLEPHACLEAN.

Per i portatori di lenti a contatto: rimuovere le lenti prima di usare BLEPHACLEAN.

Lavare le mani accuratamente prima di usare le garze. Strappare per aprire la busta (Figura 1) e spiegare la garza all'interno; non usare alcuno strumento per aprire la busta.

Avvolgere la garza intorno alla parte superiore dell'indice.

Tenendo l'occhio chiuso, strofinare delicatamente la garza sulle palpebre e alla base delle ciglia (Figura 2).

Massaggiare con cura le palpebre con piccoli movimenti circolari, rimuovendo delicatamente croste, secrezioni o trucco.

Di fronte a uno specchio, tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore con l'altra mano, quindi strofinare con cura il bordo inferiore delle palpebre con una garza avvolta al dito (Figura 3).



Figura 1: apertura della busta



Figura 2: detergere le palpebre e la base delle ciglia



Figura 3: detergere il bordo inferiore delle palpebre

Ripetere sull'altro occhio, utilizzando una nuova garza.
Non è necessario sciacquare dopo l'utilizzo di BLEPHACLEAN garze.

PRECAUZIONI PER L'USO

Verificare che la confezione sia integra prima del primo utilizzo: utilizzare solo se la busta non è aperta.
Non utilizzare alcuna garza più di una volta, poiché potrebbe non funzionare altrettanto bene e potrebbe causare contaminazione.
È necessario contattare un operatore sanitario se i sintomi peggiorano o non migliorano.

AVVERTENZE

Tenere lontano dalla vista e dalla portata dei bambini.
Evitare di far entrare BLEPHACLEAN negli occhi; potrebbe provare una sensazione di bruciore. In questo caso, sciacquare con acqua sterile o soluzione salina.

EFFETTI COLLATERALI

I seguenti casi sono stati riportati con BLEPHACLEAN: bruciore o sensazione di prurito per alcuni minuti dopo l'uso, arrossamento o gonfiore delle palpebre, reazioni allergiche.
In tali casi, i portatori di lenti a contatto devono rimuovere le lenti a contatto.
Se si notano effetti collaterali o sensazioni insolite dopo aver utilizzato questo prodotto, contattare un operatore sanitario e segnalare le informazioni al distributore locale, al produttore o all'autorità sanitaria locale.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E DI SMALTIMENTO

Conservare a temperatura tra 8°C e 25°C.
Non esporre il prodotto alla luce diretta e all'umidità.
Gettare la garza immediatamente dopo l'uso.
Non utilizzare dopo la data di scadenza, che è riportata sulla busta e sulla confezione esterna.
La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese, purché la confezione sia integra e sia stata conservata correttamente.
Smaltire il prodotto in modo responsabile e secondo le indicazioni locali (la busta deve essere smaltita come rifiuto domestico, l'astuccio esterno e il foglio illustrativo sono riciclabili).

CLASSE	PREZZO AL PUBBLICO
CE MARK	€ 13,50

Garze sterili