

# BLEPHADEMODEX<sup>®</sup>

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

**Questo prodotto è un dispositivo medico.  
Leggere le istruzioni prima dell'uso.  
Conservare questo foglio illustrativo.  
Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.**

### INDICAZIONI

BLEPHADEMODEX è una garza sterile, impregnata con una lozione per la detersione giornaliera delle palpebre in presenza di un'infezione da *Demodex*.

Usare solo sulla pelle, non inserire direttamente negli occhi.

### INDICATO PER

Solo adulti.

### CONTROINDICAZIONI

Non usare BLEPHADEMODEX se è allergico a uno dei suoi ingredienti (vedere Descrizione del dispositivo).

In assenza di dati sufficienti, non usare BLEPHADEMODEX in gravidanza o in allattamento salvo prescrizione medica.

**In assenza di dati sufficienti, non usare BLEPHADEMODEX nei bambini, tranne se prescritto dal medico.**

### DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

BLEPHADEMODEX è una garza sterile, impregnata con una lozione.

La lozione contiene: PEG-8, Polisorbato 80, Poloxamer 184, Terpinen-4-olo, PEG-6 caprilico/caprico gliceridi Macrogol 6 glicerolo caprilocaprato, Sodio ialuronato, Potassio fosfato dibasico, Potassio fosfato monobasico, Acqua depurata.

BLEPHADEMODEX è privo di detergenti aggressivi e di conservanti. BLEPHADEMODEX ha profumo fresco grazie ai suoi componenti naturali, tale profumo si dissipa in pochi minuti dopo l'applicazione.

Il colore della garza può variare. Questo è dovuto alla presenza di estratti naturali di piante (Terpinen-4-olo, estratto purificato dall'olio dell'albero del té) ed è normale.

### VANTAGGI, PRESTAZIONI E MECCANISMO DI AZIONE

BLEPHADEMODEX è raccomandato:

- per l'igiene quotidiana delle palpebre in caso d'infezione da *Demodex*,

- per alleviare i sintomi dell'infezione o dell'infiammazione delle palpebre (blefariti) causate da *Demodex*.

*Demodex* è il più comune parassita microscopico della pelle ma quando c'è un sovraccarico, possono verificarsi sintomi irritanti come prurito, bruciore, palpebre dolenti, arrossamento del margine delle palpebre e sensazione di corpo estraneo.

La presenza di forfora cilindrica, che rimane alla base delle ciglia, è fortemente indicativa per l'infezione da *Demodex*.

*Demodex* non viene rimosso dai soliti sistemi di pulizia quotidiana ed è richiesto un trattamento dedicato.

BLEPHADEMODEX pulisce croste, forfora, impurità e agenti infettivi su palpebre e ciglia.

BLEPHADEMODEX migliora i sintomi legati all'infezione da *Demodex*, come prurito, bruciore, secchezza e infiammazione del margine delle palpebre. Il rossore delle palpebre e le sensazioni di corpi estranei sono ridotti.

Contiene sodio ialuronato, un agente idratante naturale che lenisce e rigenera la pelle sensibile.

BLEPHADEMODEX è ben tollerato.

Il prodotto è stato testato sotto controllo oftalmologico.

### RACCOMANDAZIONI GENERALI PER L'USO

Dosaggio:

- Sintomi da lievi a moderati: usare una volta al giorno, preferibilmente alla sera per 4 settimane.

- Sintomi da moderati a severi: usare due volte al giorno, al mattino e alla sera per 4 settimane.

Il professionista sanitario potrà adattare la posologia e la durata del trattamento in accordo alla severità dei sintomi.

Come per altri trattamenti simili, per la blefarite, l'uso concomitante di lacrime artificiali deve essere raccomandato da professionisti sanitari.

Non è richiesta una formazione particolare per usare BLEPHADEMODEX.

Per i portatori di lenti a contatto: rimuovere le lenti prima di usare BLEPHADEMODEX.

Lavare le mani accuratamente prima di usare le garze.

Strappare per aprire la busta (Figura 1) e spingere la garza all'interno; non usare alcuno strumento per aprire la busta.

Avvolgere la garza intorno alla parte superiore dell'indice.

Tenendo l'occhio chiuso, strofinare delicatamente la garza sulle palpebre e alla base delle ciglia (Figura 2).

Massaggiare con cura le palpebre con piccoli movimenti circolari, rimuovendo delicatamente croste o secrezioni.



Figura 1: apertura della busta



Figura 2: detergere le palpebre e la base delle ciglia

Ripetere sull'altro occhio, utilizzando una nuova garza.

BLEPHADEMODEX non unge e non è necessario sciacquare dopo l'uso.

Mantenere l'occhio chiuso per 15 secondi dopo l'uso.

### PRECAUZIONI PER L'USO

Verificare che la confezione sia integra prima del primo utilizzo: utilizzare solo se la busta non è aperta.

Non utilizzare alcuna garza più di una volta, poiché potrebbe non funzionare altrettanto bene e potrebbe causare contaminazione.

È necessario contattare un operatore sanitario se i sintomi peggiorano o non migliorano.

### AVVERTENZE

Tenere lontano dalla vista e dalla portata dei bambini.

Evitare di far entrare BLEPHADEMODEX negli occhi; potrebbe provare una sensazione di bruciore. In questo caso, sciacquare con acqua sterile o soluzione salina.

### EFFETTI COLLATERALI

I seguenti casi sono stati riportati: sensazione di bruciore dopo l'uso.

In tali casi, i portatori di lenti a contatto devono rimuovere le lenti a contatto.

Se si notano effetti collaterali o sensazioni insolite dopo aver utilizzato questo prodotto, contattare un operatore sanitario e segnalare le informazioni al distributore locale, al produttore o all'autorità sanitaria locale.

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E DI SMALTIMENTO

Conservare a temperatura tra 8°C e 25°C.

Non esporre il prodotto alla luce diretta e all'umidità.

Gettare la garza immediatamente dopo l'uso.

Non utilizzare dopo la data di scadenza, che è riportata sulla busta e sulla confezione esterna.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese, purché la confezione sia integra e sia stata conservata correttamente.

Eliminare il prodotto in maniera responsabile e in accordo alle linee guida locali (la busta e la garza devono essere smaltiti come rifiuti domestici, l'astuccio e il foglio illustrativo sono riciclabili).

CLASSE	PREZZO AL PUBBLICO
CE MARK	€ 25,00

30 garze sterili monouso